



Region Kalmar län

Klinisk kemi och transfusionsmedicin

1(2)

2019-01-07

## Anvisning, etiketter Cosmic – märkning av rör

### Etiketthantering

#### Venprov

- Välj rätt etikett anpassat efter typ av rör. Se etikettens text ang. korkens färg.
- Klistra streckkodsetiketten lodrätt med sifferserien direkt under rörets kork. Felpacerade etiketter kan inte läsas av laboratoriets analysinstrument.
- Etiketten ska vara utan veck och med läsbar utskrift.
- Har röret en etikett från tillverkaren, klistra Cosmicetiketten över denna.
- Lämna utrymme för att kunna se rörets innehåll och fyllnadsgrad.
- Fyll röret till markeringen eller till dess vakuum upphör.



#### Kapillärprov

- **EDTA-rör**, lila kork, klistra streckkodsetiketten lodrätt med sifferserien direkt under rörets kork, på samma sätt som för venprov.
- **Övriga mikrorör** – sätt ihop rör och rörförlängare och placera streckkodsetiketten enligt ovan på det ihopsatta röret. Om två rör tas för att få tillräcklig mängd för beställd analys, märks det ena röret med namnetikett och det andra med den lilla etiketten.
- **Rör för analys av k-PK** – rör kan beställas efter kontakt med labb. Dubbelprov tas – märk det ena röret med namnetikett och det andra med den lilla etiketten.



#### Urinprov

- Plaströr med rund eller konisk botten - märks på samma sätt som venprov. Klistra streckkodsetiketten lodrätt med sifferserien direkt under rörets kork.
- Plastflaska/dunk för urinsamling – klistra streckkodsetiketter på uppsamlingskärlet.

### Övrigt provtagningsmaterial

Klistra etiketten, väl synlig, på provtagningskärlet.

## Etikettförklaringar

The image shows four laboratory labels stacked vertically. Each label contains patient information, a barcode, and analysis details. Arrows point from text labels on the right to specific fields on the labels.

Label ID	Analysis Name	Color	Code
36	LILA 7mL	PEIfores	70001170
08	MINTGRÖN	PKem	70001170
07	LJUSBLÅ	PKoag	70001170
03	LILA 5mL	BHema	70001170

**Patientidentitet**  
Personnummer och namn

**Röridentitet**  
LID-nummer, i klartext  
LID-nummer, streckkod

**Provtagningsinformation**  
Analysnamn  
Färg på rörets kork

**Övrig information**  
Bokstav för analyserande laboratorium  
K - Kemi  
M - Mikrobiologi  
P - Patologi  
Kod för beställande avdelning/mott