

Avgränsning/Bakgrund

Sterilkontroll av benvävnad för donation genom odling i buljong av benbiopsi. Analysen ska EJ användas för kliniska indikationer.

Provtagning

Placera en liten del (< 1cm diameter) av benmaterialet i FAB-buljongburk (sterilförpackad). Märk burken med remiss-etikett.



Figur 1. FAB-buljongburk, beställs via telefon från Klinisk mikrobiologi, Kalmar, telefonnummer: 0480-814 41.

Ange på remissen

I Cosmic: Vårdhygien/Donerad benvävnad (benbank)/Sterilkontroll. Ange donationsnumret i anamnesen. Meddela laboratoriet vid eventuella problem vid provtagningen.

I avvaktan på transport

Förvaras i rumstemperatur.

Svar och bedömning

Slutsvar efter 6 dygn. Telefonsvar lämnas ej.

Faktorer som påverkar svarets kvalitet

- Ej steril provtagning
- Inkubering i fel miljö innan prov anländer till Klinisk mikrobiologi