

Text författad av Ute Krüger

## Syfte/Omfattning

### **Klinisk patologi – Rätt etikettering**

Etikett ska ha streckkod och ska klistras vertikalt på provkärlet. Det möjliggör automatisk avläsning av streckkoden vilket ökar patientsäkerheten.

En optisk avläsare klarar inte av att läsa runt en burk, den måste se hela streckkoden samtidigt.


## Utförande/Beskrivning

### **RÄTT ETIKETTERING**



Vertikal etikett där streckkod är vänd åt höger.

### **FELAKTIG ETIKETTERING**

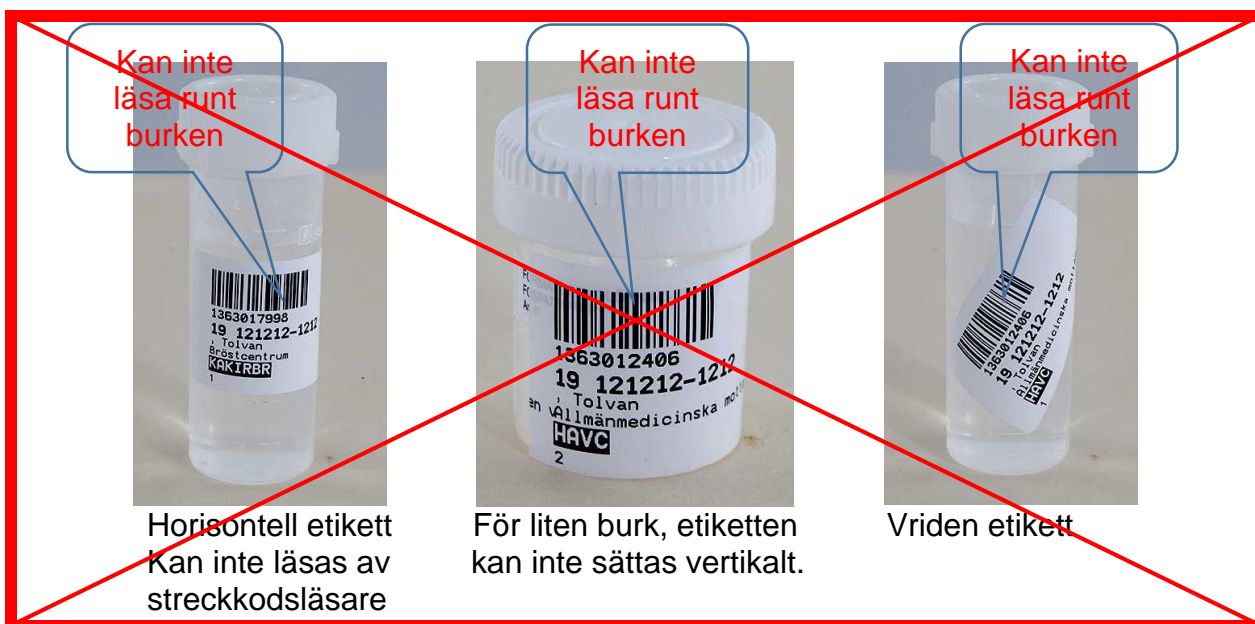

Kan inte  
läsa runt  
burken

Kan inte  
läsa runt  
burken

Kan inte  
läsa runt  
burken

Horisontell etikett  
Kan inte läsas av  
streckkodsläsare

För liten burk, etiketten  
kan inte sättas vertikalt.

Vriden etikett

## Utförande/Beskrivning

### **Klinisk cytologi – Rätt etikettering**

Etikett ska ha streckkod och ska klistras vertikalt på provkärlet. Det möjliggör automatisk avläsning av streckkoden vilket ökar patientsäkerheten.


En optisk avläsare klarar inte av att läsa runt en burk, den måste se hela streckkoden samtidigt.

### **RÄTT ETIKETTERING**



Vertikal etikett där streckkod är vänd åt höger.

### **FELAKTIG ETIKETTERING**

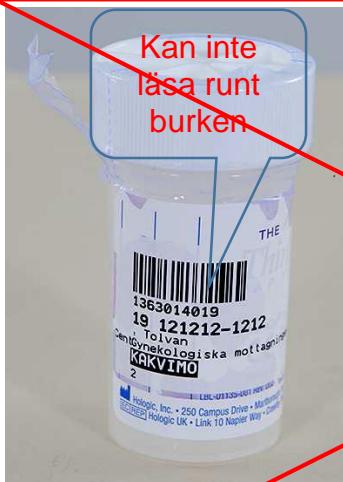

Förslutning ej avtagen samt horisontell etikett kan inte läsas av streckkodsläsare.




Etiketten döljer innehållet och streckkod vänd åt vänster.

## Akutmärkning



Prov där akut svar önskas skall märkas med etikett "AKUT" i anslutning till, dock inte direkt på, etiketten med patientidentitet. Detta för snabbast möjliga handläggning.

## Stora provkärl

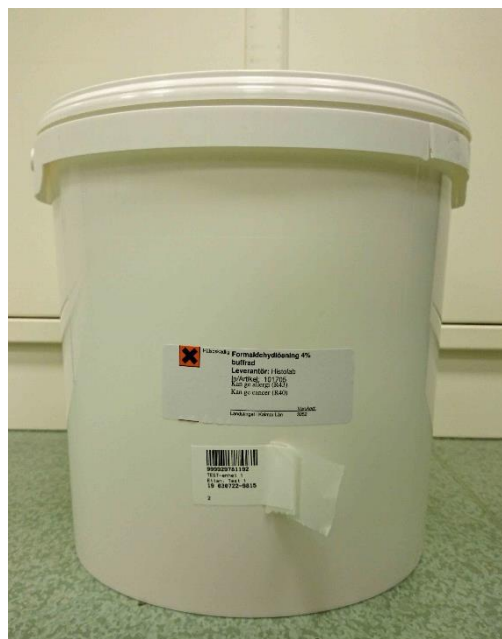

Etikett på större provkärl behöver inte klistras fast helt och hållet, utan underlagspappen kan med fördel följa med etiketten. I de fall då prov måste överföras till nytt provkärl riskerar inte etiketten att gå sönder.